

AllProMask FFP2



1. Händehygiene

Vor dem Anlegen und nach dem Ablegen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.



2. Anlegen

Nasenbügel nach oben. Schlaufen über die Ohren ziehen. Gesichts- und Kopfhaare können den korrekten Sitz verhindern.



3. Anpassen

Nasenbügel andrücken. Achten Sie auf einen festen Sitz, sodass Sie ausreichend einatmen können ohne Nebenluft zu ziehen.



4. Ablegen

Schlaufen nach vorne abziehen. Die Außenseite kann mit Aerosolen belastet sein. Vermeiden Sie den Kontakt.

